


試劑使用流程

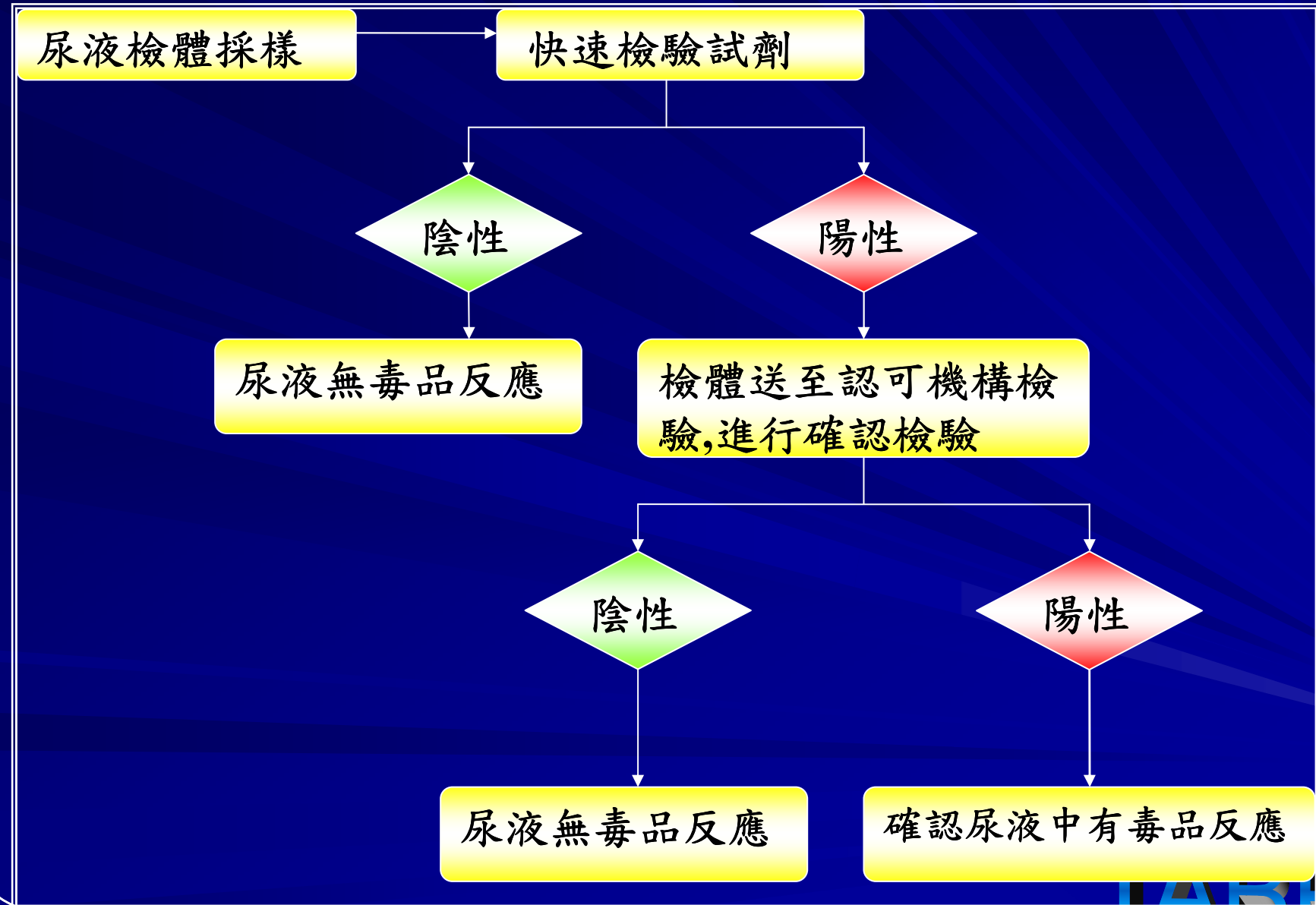

使用操作

- 1. 由切口撕開鋁箔包裝，取出試紙卡。
- 2. 使用包裝內所附之滴管吸取檢體，滴入三滴~四滴尿液於樣品收集區中，等待檢體上升至測試區中。（注意：不可將檢體直接滴入測試區中，以免影響到判讀結果。）
- 3. 等待5-10分鐘後即可判讀結果。（注意：請在30分鐘內判讀完畢，以免因時間因素而干擾判讀結果。）


◎ 試劑操作步驟

步驟1. 檢查外觀包裝完整、未超過有效期限

*正面



*背面

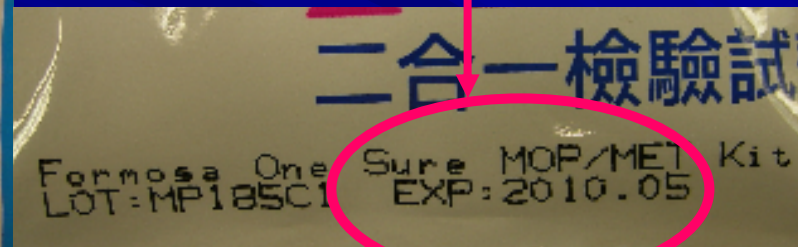

TABP

試劑外包裝 (2合1)



試劑外包裝 (K他命)



◎ 試劑操作步驟

步驟2. 沿缺口撕開



◎ 試劑操作步驟

步驟3. 檢查內容物(試劑片、 乾燥劑、小吸管)

2合1試劑




TABP

◎ 試劑操作步驟

步驟3. 檢查內容物(試劑片、 乾燥劑、小吸管)

K他命試劑

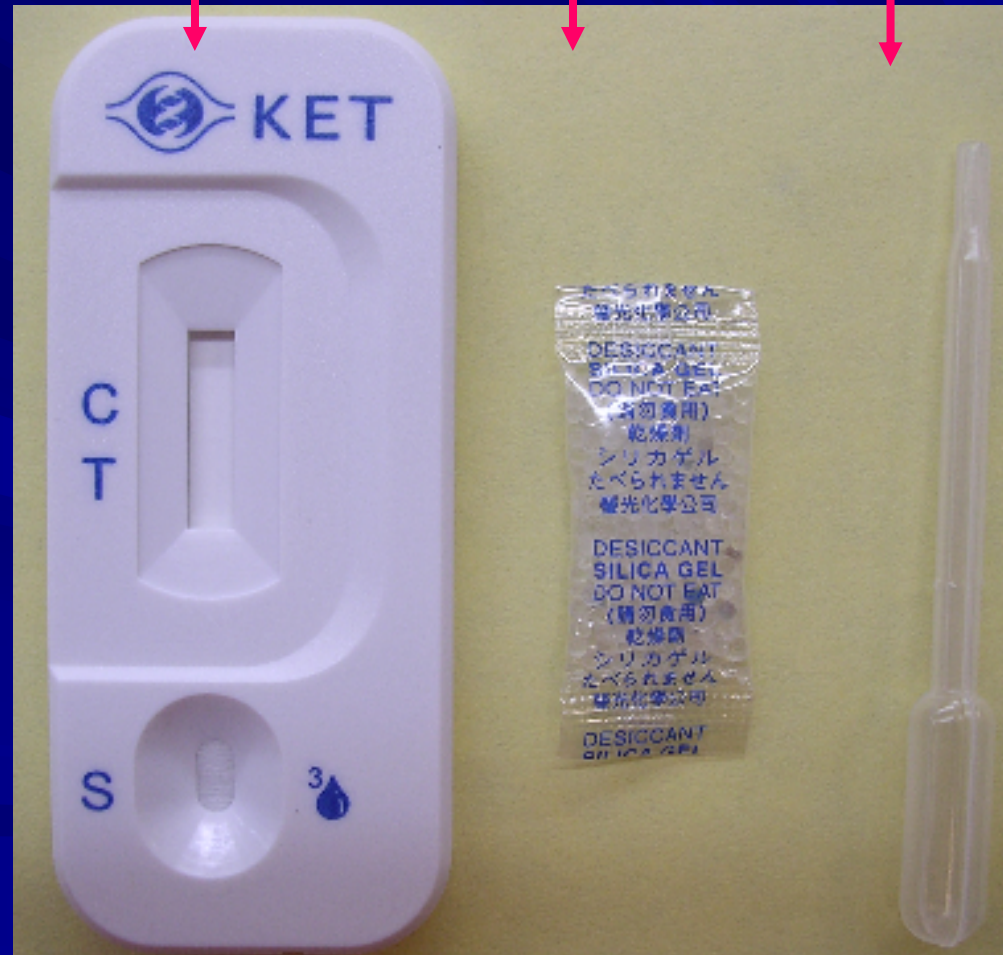



◎ 試劑操作步驟

步驟4. 吸取檢體






◎ 試劑操作步驟

步驟5. 滴2 ~ 3滴尿液在檢體孔中

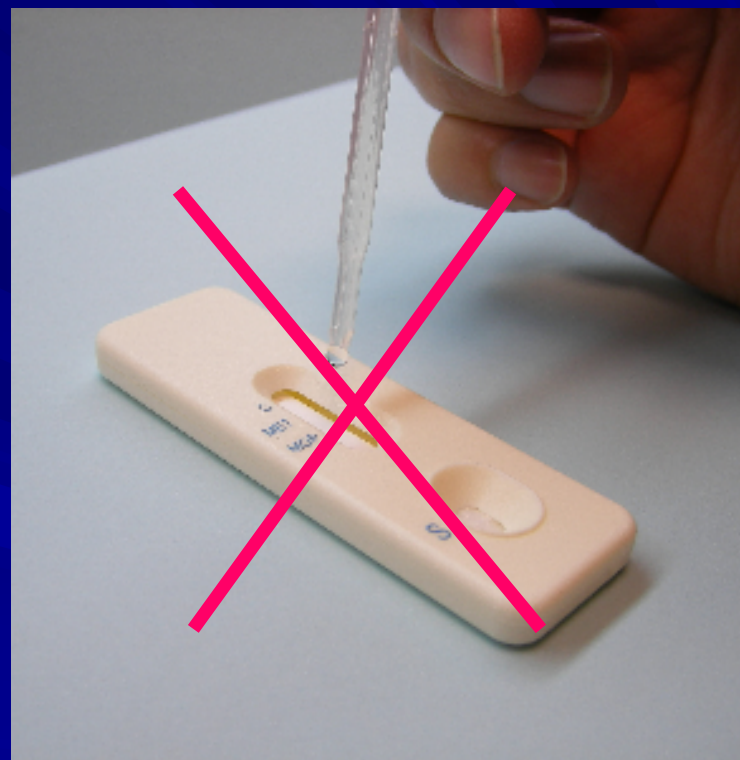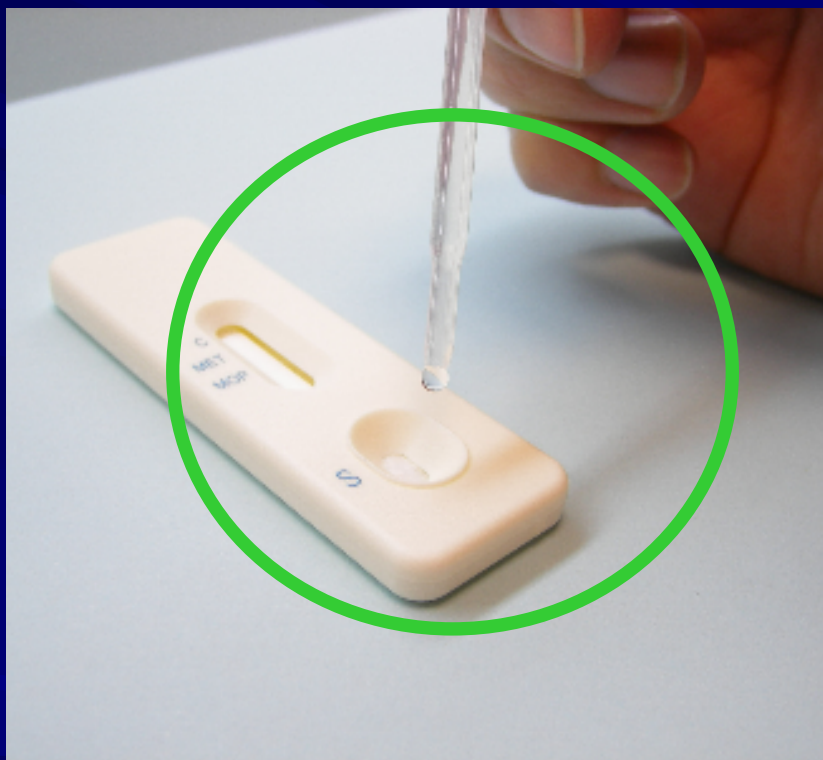

◎ 試劑操作步驟

步驟6. 等待5分鐘，試劑反應時間
(大約2分鐘, C線出現即可判定)

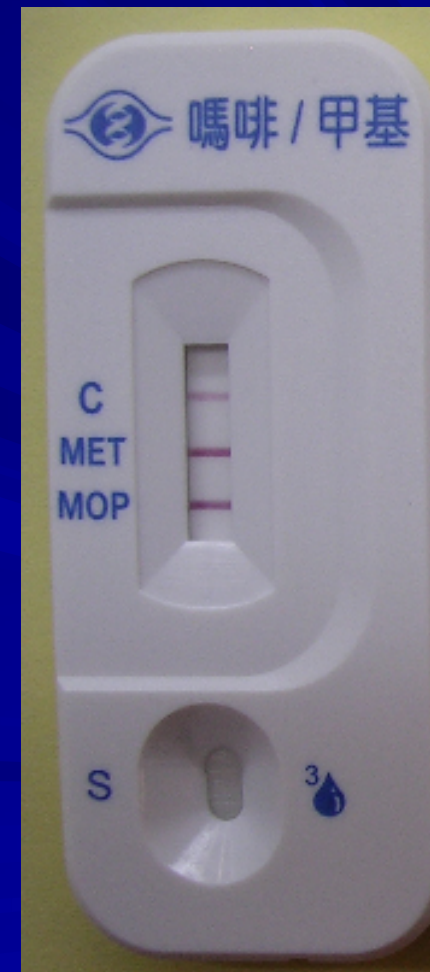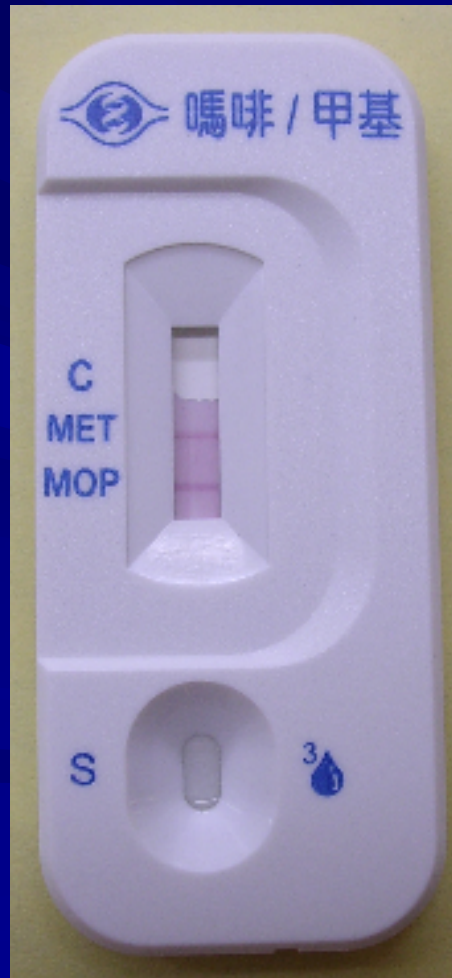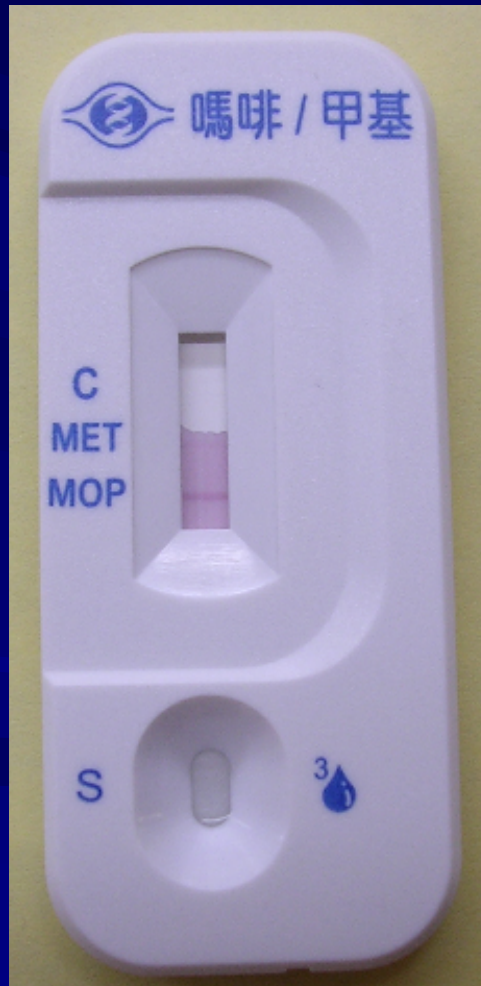

結果判定 (2合1試劑)



陰性

嗎啡

安非他命

嗎啡/安非他命


陽性

陽性

陽性

TABP

結果判定 (K他命試劑)

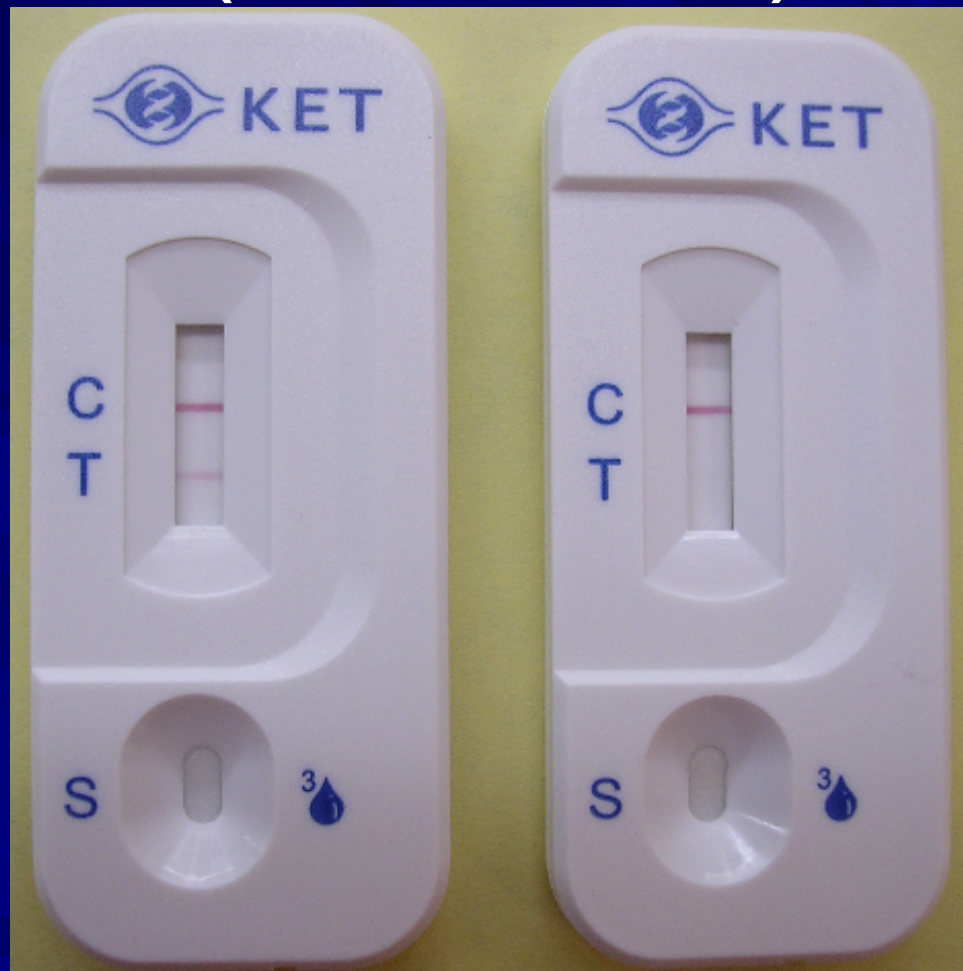

陰性

K他命

陽性

TABP

台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司

濫用藥物檢驗中心

電話：02-26926222#416/202 傳真：02-26952259

98年試劑複驗尿液篩檢檢體監管記錄表

採尿日期：		受檢學校名稱/學校代碼：			頁次：		
序 號	檢體編號	性別		檢驗項目			
		男	女	K他命	安非他命	鴉片類	搖頭丸

以上尿液檢體共 _____ 件 採尿監督人員簽名： _____

報告寄送地址： _____

報告收件人： _____ 聯絡電話： _____

備註： _____

